

სამედიცინო დანიშნულების საქონელის

გამოყენების ინსტრუქცია

კოლდისექტი ნანოსილვერი

ნაზალური სპრეი

სავაჭრო დასახელება

კოლდისექტი ნანოსილვერი

ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ

არკონა ლაბორატორია სტომატოლოგიური ფარმაკოლოგიის გჟეგოჟა კალბარჩიკა, ნასუტუვი 99C, 21-025 ნემცე, პოლანდია

АРКОНА Лаборатория стоматологической фармакологии Гжегожа Калбарчика, Насутув 99C, 21-025 Немце, Польша

დანიშნულება

სამედიცინო გამოყენების საქონელი კოლდისექტი ნანოსილვერი ნაზალური სპრეის სახით აუქმებს ცხვირის ლორწოვანის სიმშრალეს და გაღიზიანებას, ერთდროულად იცავს გარემოს მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან, კერძოდ შემდეგი მდგომარეობების დროს:

- ინფექციური ან ალერგიული რინიტი
- ატროფიული რინიტი
- ისეთი მედიკამენტების გამოყენება, რომლებსაც აქვთ მავნე ზეგავლენა ცხვირის ლორწოვანზე
- სინუსიტი
- გარემოს მავნე ფაქტორების არსებობა (ჰაერის დაბინძურება, მტვერი, ექსტრემალური ტემპერატურა)
- მოწევა
- ცხვირის ლორწოვანი გარსის სიმშრალე, რომელიც გამოწვეულია ცენტრალიზებული გათბობის ან კონდიციონერების სისტემის მუშაობით
- ხანდაზმული ასაკი.

სამედიცინო გამოყენების საქონელი კოლდისექტი ნანოსილვერი ატენიანებს და ამშვიდებს ცხვირის ლორწოვან გარსს, ხელს უწყობს მის რეგენერაციას და წვის შეგრძნების გაუქმებას.

შეიცავს ვერცხლისა ნანონაწილაკებს, რომლებიც ამცირებენ ბაქტერიებისა ზრდას. სამედიცინო საქონელი ქმნის გელის აპკს, რომელიც იცავს ბაქტერიებისგან და ვირუსებისგან, ხელს უწყობს ლორწოვანი გარსის რეგენერაციას. აღნიშნული თვისება განპირობებულია შემადგენლობაში მინერალური მარილებისა და მცენარეული ექსტრაქტების არსებობით.

გამოყენების პირობები: გამოიყენეთ სისტემატიურად ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად.

არ წარმოადგენს სამკურნალო საშუალებას.

ტექნიკური და ფუნქციონალური დახასიათება

პარამეტრის დასახელება	აღწერილობა
-----------------------	------------

ნაწარმის აღწერილობა და მოწყობილობა	სითხე ფლაკონში ტუმბო-დოზატორით და გამაფრქველებლით, პლასტიკური დამცველი თავსახურით. ერთი ფლაკონი გამოყენების ინსტრუქციასთან ერთად მუყაოს კოლოფში.
შევსების მოცულობა	20 მლ (200 დოზა; 0.1 მლ/დოზა)
შიგთავსის დახასიათება	გამჭვირვალე ერთგვაროვანი სითხე ხილული გაუხსნელი ნაწილაკების გარეშე
შიგთავსის შემადგენლობა	გასუფთავებული წყალი, გლიცერინი, ნანოკოლოიდური ვერცხლი, სორბიტოლი, ნატრიუმის ბენზოატი, კალიუმის დიჰიდროფოსფატი, კალიუმის ქლორიდი, ნატრიუმის ქლორიდი, კალციუმის ქლორიდი, ჰექსაგიდრატი, მაგნიუმის ქლორიდი, ჰექსაგიდრატი, ირლანდიური ხავსის ექსტრაქტი, ლიმონმჟავა.

გამოყენების უკუჩვენებები

- ინდივიდუალური აუტანლობა პრეპარატის კომპონენტების მიმართ.
- ვერცხლის მიმართ ალერგია

სიფრთხილის ზომები

- მოერიდეთ შემთხვევით კონტაქტს თვალების ლორწოვან გარსზე;
- შეაჩერეთ გამოყენება, თუ გამოვლინდა რაიმე საგანგაშო სიმპტომი;
- ნებულაიზერის დაბინძურების შემთხვევაში, აუცილებელია მისი მოხსნა, გარეცხვა გამდინარე წყლის ქვეშ, შემდეგ ამ ნაწილის მოხარშვა ან მდულარე წყლით გავლება;
- ორსულ ქალებსა და 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს სამედიცინო გამოყენების საქონელი უნდა იყოს გამოყენებული მხოლოდ ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ.

დოზირების რეჟიმი და გამოყენების მეთოდი

დოზირების რეჟიმი

სამედიცინო გამოყენების საქონელი კოლდისებრ ნაწილაკოვანი ნაზალური სპრეის სახით გამოიყენება შესაძლოა დროის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მიჩვევის, გვერდითი ეფექტების და გართულებების გაჩენის გარეშე.

გამოიყენებენ 3-4-ჯერ დღეში. განკუთვნილია უწყვეტი გამოყენებისათვის არა უმეტესს 30 დღის განმავლობაში.

გამოყენების მეთოდი

1. პირველ გამოყენებამდე საჭიროა რამდენიმე საცდელი დაჭერა დოზირების ტუმბოზე.
2. შეიყვანეთ ნებულაიზერი ცხვირის ღრუსში.
3. შესხურეთ 1-2 დოზა ცხვირის თითოეულ ნესტოში.

გვერდითი მოვლენები, რომლებიც დაკავშირებულია სამედიცინო გამოყენების საქონელის გამოყენებასთან, კომბინირებულ გამოყენებას სხვა სამედიცინო მოწყობილობებთან ან ინდივიდუალურ წამლებთან

გვერდითი მოვლენების შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. ჰიპერმგრძნობელობის მქონე პაციენტებს შეიძლება განუვითარდეთ ალერგიის სიმპტომები. ალერგიის სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში შეწყვიტეთ სამედიცინო გამოყენების საქონელის გამოყენება.

გვერდითი მოვლენების ყველა შემთხვევის შესახებ ინფორმაცია, რომლებიც არ არის მითითებული გამოყენების ინსტრუქციაში, გვერდითი რეაქციები, სამედიცინო გამოყენების საქონელის ურთიერთქმედების თავისებურებები, ფაქტები და გარემოებები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის პაციენტის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას ამ სამედიცინო მოწყობილობის გამოყენებისას, უნდა გადაეცეს იმ ქვეყნის კომპეტენტურ ორგანოს, სადაც ცხოვრობს პაციენტი.

შენახვის და გამოყენების წესები

ვარგისობის ვადა - 3 წელი.
არ გამოიყენოთ შეფუთვაზე მითითებული ვარგისობის ვადის გასვლის შემდეგ.
ინახება არაუმეტეს 25°C ტემპერატურაზე, მშრალ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

შეფუთვაზე მითითებული სიმბოლოების აღწერა

	ვარგისია:
	სერია:
	მიმართეთ გამოყენების ინსტრუქციას
	ევროპული შესაბამისობის ნიშანი